

LEVE PERSONNE

Winn'Motion 175

CONFORME À LA NORME EN ISO 10535 : 2007 APPLICABLE AUX LÈVE-PERSONNES POUR TRANSFÉRER DES PERSONNES HANDICAPÉES.

NOUVEAU DESIGN

- Bouton d'arrêt d'urgence sur le côté du boîtier
- Indication sonore de déchargement des batteries
- Vérin :
 - système anti-écrasement
 - débrayage manuel du vérin au moyen d'une molette ergonomique
- Lève personne adapté pour les patients pesant jusqu'à 175 kg



Écartement des pieds manuel à l'aide d'un système de pédale

Sécurité :

- Fléau rembourré et sécurisé par des attaches dotées du système anti-retour
- Boîtier de contrôle avec arrêt d'urgence
- Témoin sonore de remise en charge des batteries
- Système de descente d'urgence électrique
- Système anti-écrasement
- Débrayage du vérin par système de molette ergonomique
- Batterie autonomie 40 cycles (24 volts) (1 cycle = 1 montée/1 descente), temps charge complète : 8 à 10 heures

Pratique :

- Léger et compact pour le domicile et la collectivité
- Facile à démonter en 2 parties
- Facile à transporter et à stocker
- Maniable : roues double galets Ø 75 mm à l'avant et Ø 100 mm à l'arrière
- Poids : 36 kg
- Rotation du fléau de 360°



Bouton arrêt d'urgence



Fléau 4 points sécurisés.



Différents réglages des sangles grâce à des repères de couleur.


Sangle bain



Sangle Fletty avec tête



Sangles disponibles : Bain Fletty, 3D confort, avec ou sans têtes, 2 tailles (M ou L)

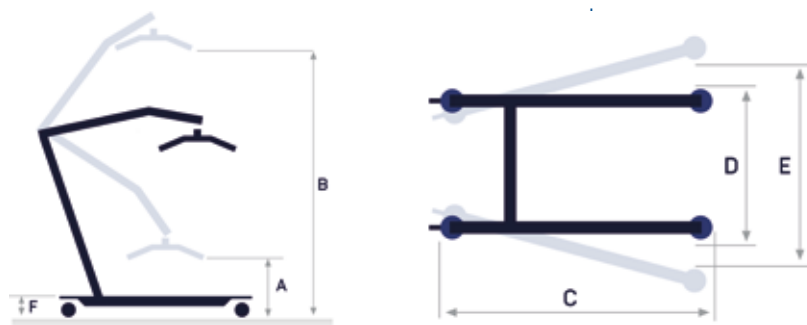

Option système de pesée Classe III Médicale (175 kg Précision 0,100 g)

DÉSIGNATION	A	B	C	D	E	F	POIDS PATIENT MAX	ROUES AV	ROUES AR	NORMES	MOTORISATION	POIDS
WINN'MOTION 175	59 49	185 175	110	65	84	12	175 kg	75	100	ISO 10535	LINAK IP 54	36 kg

Garantie électrique, mécanique et télécommande : 5 ans
Batteries, sangles et unité de pesée : 1 an

MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

www.winnicare.fr



Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.



SANGLES POUR LEVE PATIENTS

(compatible avec **WINNMOTION 150** et **WinnMotion 175**)

UNE GAMME COMPLÈTE DE SANGLES, ADAPTÉES À NOS
LÈVE-PERSONNES ET CONFORME À LA NORME EN 10535,
(LÈVE-PERSONNES POUR TRANSFÉRER DES PERSONNES HANDICAPÉES)

- **Confort** : les zones positionnées sous les cuisses du patient sont rembourrées afin de permettre une meilleure mise en place de la sangle. Elles garantissent ainsi un meilleur maintien.
- **Ergonomie** : la symbolisation de la colonne vertébrale par un liseret jaune facilite le positionnement de la sangle notamment en position allongée. Les poignées de couleurs aident au guidage du patient lors des opérations de transfert.
- **3 matériaux pour 3 utilisations différentes** :
 - le PVC pour le bain,
 - le fletty pour les transferts les plus courants,
 - le 3D confort pour répondre aux contraintes de mise place de personnes présentant des pathologies spécifiques.
- **Traçabilité** : identification par numéro de lot et année de fabrication.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SANGLES

- 2 tailles : **M** ou **L** pour des patients jusqu'à 175 kg.
- 3 réglages pour des patients de 1,50 m à 1,90 m.
- Avec ou sans têteière : pour les transferts de personnes avec un trouble ou non du maintien de la tête.
- Rembourrage des zones sous les cuisses : pour une mise en place plus aisée et un confort optimisé du patient.
- Repère visuel du bon positionnement de la sangle : symbolisation de la colonne vertébrale par un liseret jaune.
- Poignées latérales d'aide au repositionnement au fauteuil. Poignée dorsale d'aide au repositionnement au lit.
- Compatible avec des fléaux 2 et 4 points.



PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

TYPE DE TRANSFERT	SANGLES	SANGLE BAIN	SANGLE BAIN TÊTIÈRE	SANGLE FLETTY	SANGLE FLETTY TÊTIÈRE	SANGLE CONFORT 3D	SANGLE CONFORT 3D TÊTIÈRE
Assis ↔ Assis		•	•	•	•	•	•
Assis ↔ Allongé		•	• ^(*)	•	• ^(*)	•	• ^(*)
Douche et Bain		•	•				
Vers et depuis les toilettes		•	•				
depuis le sol			•		•		•
ETAT FONCTIONNEL DU PATIENT	SANGLES	SANGLE BAIN	SANGLE BAIN TÊTIÈRE	SANGLE FLETTY	SANGLE FLETTY TÊTIÈRE	SANGLE CONFORT 3D	SANGLE CONFORT 3D TÊTIÈRE
Instabilité de la tête			•		•		•
Rétraction du corps						•	•
Amputation des membres inférieurs	POUR AMPUTATION AU NIVEAU DU GENOU : FAIRE PASSER CHAQUE SANGLES SOUS LES 2 CUISSES.						

^(*) Recommandée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SANGLE BAIN	SANGLE BAIN TÊTIÈRE	SANGLE FLETTY	SANGLE FLETTY TÊTIÈRE	SANGLE CONFORT 3D	SANGLE CONFORT 3D TÊTIÈRE
Taille M	102 104 004	102 104 016	102 107 012	102 107 016	102 105 012	102 105 016
Taille L	102 104 013	102 104 017	102 107 013	102 107 017	102 015 013	102 105 017
Matière	POLYESTER PVC		POLYPROPYLENE		POLYESTER 3D	
Qualité	TEXTILE IMPERMÉABLE		TEXTILE NON-ADHÉRENT		TEXTILE RESPIRANT	
Lavage et entretien						
Particularités			REMBOURRAGE SOUS LES CUISSES		REMBOURRAGE SOUS LES CUISSES	
POUR LES SANGLES AVEC TÊTIÈRES : RENFORT DE LA PARTIE SUR LAQUELLE REPOSE LA TÊTE						

Garantie 1 an

MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
 Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

